

ThermaCare®

ТермаКэр

АППЛИКАТОР РАЗОГРЕВАЮЩИЙ

16 часов избавления от боли

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ И ОСТРОЙ БОЛИ

ДЛЯ СПИНЫ

- избавление от боли без лекарств
- снятие мышечного напряжения
- длительное действие

запатентованные прогревающие ячейки

2 ОДНОРАЗОВЫХ АППЛИКАТОРА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

**АППЛИКАТОРЫ РАЗОГРЕВАЮЩИЕ ТЕРМАКЭР/THERMACARE®
ДЛЯ СПИНЫ. В ВИДЕ МЯГКОГО ПОЯСА.**

Действие:

Разогревающий аппликатор ТермаКэр способствует глубокому мышечному расслаблению, улучшению кровотока, облегчению боли.

До 16 часов избавления от боли без лекарств!

- Разогревающий аппликатор ТермаКэр обеспечивает длительный обезболивающий эффект без применения лекарственных средств за счет глубокого прогревающего действия
- Воздействие интенсивного тепла способствует глубокому мышечному расслаблению, улучшению кровотока, облегчению боли
- Для достижения максимального эффекта рекомендуется носить разогревающий аппликатор в течение 8 часов
- При применении разогревающего аппликатора для спины обезболивающий эффект длится до 16 часов (8 часов во время носки и еще 8 часов после снятия аппликатора)

- Нагревание ячеек аппликатора начинается непосредственно при вскрытии пакета с аппликатором
- Очень прост и удобен в применении: легко одевается и снимается
- Тонкий, незаметный под одеждой, не стесняет движений
- В отличие от разогревающих мазей не имеет запаха и его можно использовать в течение рабочего дня.

Показания:

Для облегчения боли в мышцах, суставах и связках, связанной с:

- перенапряжением
- растяжением
- вывихом
- артритом.

При хронической и острой боли.

Способ применения:

Только для наружного применения! Одноразовый.

1. Вскройте пакет с разогревающим аппликатором непосредственно перед использованием.
2. Приложите к коже темными прогревающими ячейками в области болевых ощущений.

Лицам 55 лет и старше рекомендуется носить аппликатор поверх нательного белья или ткани и не использовать аппликатор во время сна.

3. Зафиксируйте аппликатор.

Пациентам с диабетом, нарушением кровообращения, нарушениями со стороны сердечно-сосудистой системы, ревматоидным артритом и беременным **необходимо проконсультироваться с врачом** перед применением аппликатора.

Не применять:

- Если прогревающая ячейка и/или упаковка повреждены.
- Одновременно с разогревающими мазями или другими разогревающими средствами.

- На поврежденных участках кожи.
- На открытых ранах, синяках, возникших в течение последних 48 часов.
- На участках кожи, утративших чувствительность к теплу.
- Лицам, не имеющим возможности следовать всем имеющимся инструкциям или самостоятельно удалить аппликатор, включая детей, новорожденных и некоторых лиц пожилого возраста.

Меры предосторожности:

- Если при использовании разогревающего аппликатора возникает ощущение избыточного тепла, необходимо прекратить его применение или закрепить его поверх нательного белья или ткани, избегая непосредственного контакта с кожей.
- Использование разогревающего аппликатора может вызвать ожог. Необходимо регулярно проверять состояние кожи во время использования разогревающего аппликатора. Если Вы обнаружите раздражение или ожог на коже, следует немедленно удалить разогревающий аппликатор.
- До применения во время сна необходимо предварительное использование разогревающего аппликатора в течение дня для определения индивидуальной чувствительности к теплу.
- Риск получения ожога увеличивается с возрастом. **Лицам 55 лет и старше рекомендуется носить разогревающий аппликатор поверх нательного белья или ткани и не использовать разогревающий аппликатор во время сна.**
- Не оказывайте избыточного давления на разогревающий аппликатор и не носите ремень поверх аппликатора.
- Не применяйте разогревающий аппликатор более 8 часов в течение одних суток (24 часов).

Прекратите использование и проконсультируйтесь с врачом:

- Если Вы ощущаете дискомфорт, жжение, а также при появлении отечности, сыпи или других изменений кожи при контакте с разогревающим аппликатором.

- Если болевые ощущения остаются прежними или нарастают после 7 дней применения разогревающего аппликатора.

Особые указания:

- Каждая прогревающая ячейка содержит железо (около 2 г). При случайном проглатывании необходимо немедленно обратиться к врачу.

- При попадании железа на кожу или в глаза промойте их водой, удалите разогревающий аппликатор и немедленно обратитесь к врачу.

- Никогда не нагревайте разогревающий аппликатор в микроволновой печи и не пытайтесь разогреть его для того, чтобы использовать снова, так как упаковка может воспламениться.

- Во избежание повышенного риска ожогов, разогревающий аппликатор следует удалять перед проведением МРТ (магнитно-резонансной томографии).

Хранение: При комнатной температуре. Храните в недоступном для детей и домашних животных месте.

Срок годности: 3 года. Не используйте аппликатор разогревающий после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Производитель: "Анжелини Фарма Инк.", США, Angelini Pharma Inc., 9200, Corporate Blvd., Suite 100, Rockville, MD 20850, USA.

Место производства: Angelini Pharma Inc., 1231 Wyandotte Drive, Albany, GA, 31705, USA.

Импортер: ООО «Анжелини Фарма Рус», Россия, 123001, г.Москва, Трехпрудный пер., д.9, стр.2, офис 501-516, тел. +7 (495)933-39-50, факс +7(495)933-39-51, e-mail: complaints@angelini.ru.

Претензии потребителей направлять импортеру.

Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1048 от 01/10/2020.

Срок действия неограничен.

Размеры аппликатора 1109 мм x 145 мм.

Состав: Железный порошок, вода, натрия хлорид, натрия тиосульфат, активированный уголь, абсорбирующий загуститель.