

ThermaCare®

ТермаКэр

АППЛИКАТОР РАЗОГРЕВАЮЩИЙ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ И ОСТРОЙ БОЛИ

8 часов избавления от боли

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ РАЗНЫХ УЧАСТКОВ ТЕЛА

- избавление от боли без лекарств
- снятие мышечного напряжения
- длительное действие

3 ОДНОРАЗОВЫХ АППЛИКАТОРА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

запатентованные прогревающие ячейки

АППЛИКАТОР РАЗОГРЕВАЮЩИЙ ТЕРМАКЭР/THERMACARE®
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ДЛЯ РАЗНЫХ УЧАСТКОВ ТЕЛА

До 8 часов избавления от боли без лекарств!

- Аппликатор разогревающий ТермаКэр/ ThermaCare® обеспечивает длительный эффект облегчения боли без приема лекарственных средств за счет локального прогревающего действия.
- Длительное равномерное тепловое воздействие способствует глубокому мышечному расслаблению, улучшению кровотока, ускорению естественных процессов восстановления поврежденных тканей, облегчению боли.
- Нагревание ячеек аппликатора начинается непосредственно при вскрытии пакета с аппликатором.
- Очень прост и удобен в применении: легко надевается и снимается.
- Тонкий, незаметный под одеждой, не стесняет движений.
- В отличие от разогревающих мазей не имеет запаха, и его можно использовать в течение рабочего дня.
- Для достижения максимального эффекта рекомендуется носить разогревающий аппликатор в течение 8 часов.

Показания:

Для облегчения боли в мышцах, суставах и связках, связанной с:

- перенапряжением
- растяжением
- вывихом
- артритом.

При хронической и острой боли.

Способ применения:

Только для наружного применения! Одноразовый.

1. Вскройте пакет с разогревающим аппликатором непосредственно перед использованием. Ячейки разогреваются в течение 30 минут после вскрытия пакета.
2. Приложите разогревающий аппликатор к области болевых ощущений темными нагревательными ячейками к коже.
3. Зафиксируйте разогревающий аппликатор.

Обратитесь к разделу НЕ ПРИМЕНЯТЬ для получения информации об участках тела, на которые не следует применять аппликатор.

Лицам 55 лет или старше рекомендуется носить разогревающий аппликатор поверх нательного белья или ткани и не использовать разогревающий аппликатор во время сна.

Пациентам с диабетом, нарушением кровообращения, нарушениями со стороны сердечно-сосудистой системы, ревматоидным артритом и беременным **необходимо проконсультироваться с врачом перед применением аппликатора.**

Не применять:

- Если нагревательная ячейка и/или упаковка повреждены.
- Одновременно с разогревающими мазями или другими разогревающими средствами.
- На поврежденных участках кожи.
- На открытых ранах, синяках, возникших в течение последних 48 часов.

- На участках кожи, утративших чувствительность к теплу.
- Лицам, не имеющим возможности следовать всем имеющимся инструкциям или самостоятельно удалить аппликатор, включая детей, новорожденных и некоторых лиц пожилого возраста.
- Не использовать на лице или голове, молочных железах, на сгибе рук или в подмышечной области, на пальцах, внизу живота, в паховой области, подколенной области, на ступнях или пальцах ног.

Меры предосторожности:

- Если при использовании разогревающего аппликатора возникает ощущение избыточного тепла, необходимо прекратить его применение или закрепить его поверх нательного белья или ткани, избегая непосредственного контакта с кожей.
- Использование разогревающего аппликатора может вызвать ожог. Необходимо регулярно проверять состояние кожи во время использования разогревающего аппликатора. Если Вы обнаружите раздражение или ожог на коже, следует немедленно удалить разогревающий аппликатор.
- Риск получения ожога увеличивается с возрастом. **Лицам 55 лет или старше рекомендуется носить разогревающий аппликатор поверх нательного белья или ткани и не использовать разогревающий аппликатор во время сна.**
- Не оказывайте избыточного давления на разогревающий аппликатор и не носите ремень поверх аппликатора.
- Не применяйте разогревающий аппликатор более 8 часов в течение одних суток (24 часов).
- При применении аппликатора разогревающего не допускайте перекрывания прогреваемых ячеек.
- Каждая прогревающая ячейка содержит железо (около 2 г). При случайном проглатывании необходимо немедленно обратиться к врачу.
- При попадании железа на кожу или в глаза промойте их водой, удалите разогревающий аппликатор и немедленно обратитесь к врачу.

- Никогда не нагревайте разогревающий аппликатор в микроволновой печи и не пытайтесь разогреть его для того, чтобы использовать снова, так как упаковка может воспламениться.

- Во избежание повышенного риска ожогов, аппликатор следует удалять перед проведением МРТ (магнитно-резонансной томографии).

Прекратите использование и проконсультируйтесь с врачом:

- Если Вы ощущаете дискомфорт, жжение, а также при появлении отечности, сыпи или других изменений кожи при контакте с разогревающим аппликатором.

- Если болевые ощущения остаются прежними или нарастают после 7 дней применения аппликатора.

Срок годности: 3 года. Не используйте аппликатор разогревающий после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Хранение: При комнатной температуре. Храните в недоступном для детей и домашних животных месте.

Производитель: "Анжелини Фарма Инк.", США, Angelini Pharma Inc., 9200, Corporate Blvd., Suite 100, Rockville, MD 20850, USA.

Место производства: Angelini Pharma Inc., 1231 Wyandotte Drive, Albany, GA, 31705, USA.

Импортер: ООО «Анжелини Фарма Рус», Россия, 123001, г.Москва, Трехпрудный пер., д.9, стр.2, офис 501-516, тел. +7 (495)933-39-50, факс +7(495)933-39-51, e-mail: complaints@angelini.ru.

Претензии потребителей направлять импортеру.

Регистрационное удостоверение: РЗН 2017/5657 от 01/10/2020.

Срок действия неограничен. Размеры аппликатора 188 мм x 97,3 мм.

Форма выпуска: Один аппликатор в индивидуальном вакуумном пакете. 3 пакета с аппликатором в пачке картонной.

Условия реализации: Без рецепта врача, через аптечную сеть и специализированные отделы торговой сети.

Указания по утилизации медицинского изделия: Изделие утилизируют с бытовыми отходами.

Состав: Железный порошок, вода, активированный уголь, хлорид натрия, тиосульфат натрия, абсорбирующий загуститель.